



MIR Spiro

avec abonnement **Platinum**

- \\ Logiciel complet de Spirométrie et Oxymétrie
- \\ Conçu pour être intégré aux EMR/DMP
- \\ Conforme aux recommandations ATS/ERS les plus récentes
- \\ Disponible pour ordinateurs fixes et portables
- \\ MacOS et Windows





MIR Spiro assorti de l'abonnement Platinum est le logiciel de dernière génération de spirométrie et d'oxymétrie disponible avec tous les dispositifs professionnels MIR.

Il offre une **large gamme de fonctions avancées** dans un nouveau style graphique et avec des paramètres personnalisables qui permettent des diagnostics plus approfondis, une facilité d'utilisation, une aide aux évaluations et aux décisions cliniques, l'intégration des dossiers médicaux (EMR/DMP).

Caractéristiques principales

\\ **Analyse avancée de spirométrie** : Récapitulatif des sessions avec CFV, CVL et VVM ; Historique CVF pour comparer les sessions.

Outils de modification pour :

- Définir le meilleur test (BEST)
- Activer/désactiver/supprimer/récupérer les tests
- Configurer les paramètres à afficher et l'ordre d'affichage

\\ **Analyse avancée d'oxymétrie** : Application d'analyses spécifiques :

- Test de marche (6MWT)
- Test du sommeil
- Holter Oxymétrie sur 24H avec réglage de la titration en oxygène

\\ Data Delivery Service* (DDS) :

Service de livraison de données, de la base de données locale à des plateformes tierces et EMR/DMP.

Confidentialité et sécurité :

- **Mode multi-utilisateur** : chaque utilisateur **MIR Spiro** peut se connecter via son propre compte.
- **Fonction d'anonymisation** : impression, liste des patients, exportation de données

\\ Intégration avec EMR/DMP :

Architecture fortement orientée sur l'interopérabilité qui optimise les flux de travail et l'échange de données avec les EMR/DMP. Nombreux standards supportés tels que *HL7*, *FHIR (Json) GDT*, *DICOM*, *eXchange Protocol* et beaucoup d'autres.

\\ Impressions complètes et personnalisables :





ATS2019, Winspiro classic, Niosh-Osha

\\ Importation de données :

Importation des tests à partir des dispositifs professionnels MIR


\\ Assistant virtuel :

Pour chaque session de spirométrie effectuée, **MIR Spiro** affiche la relation entre l'interprétation de la spirométrie (obstruction/restriction) et la forme de la courbe Débit / Volume, en fournissant ainsi un soutien au diagnostic.

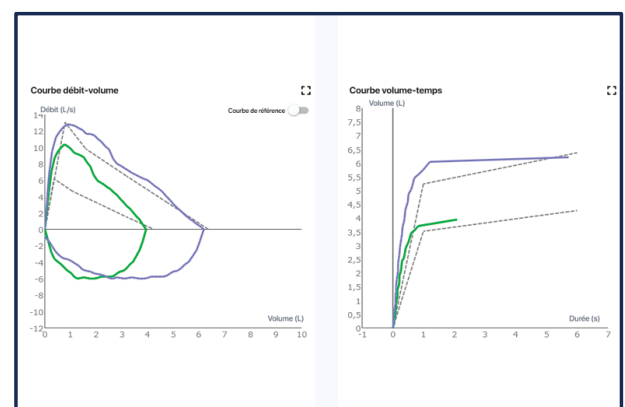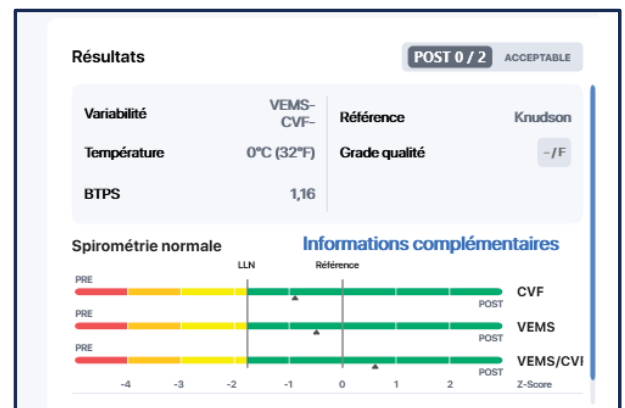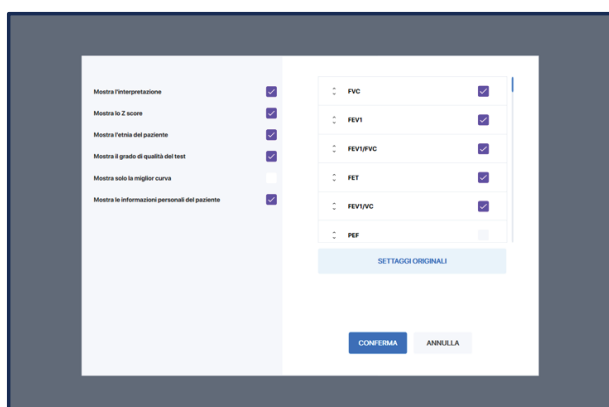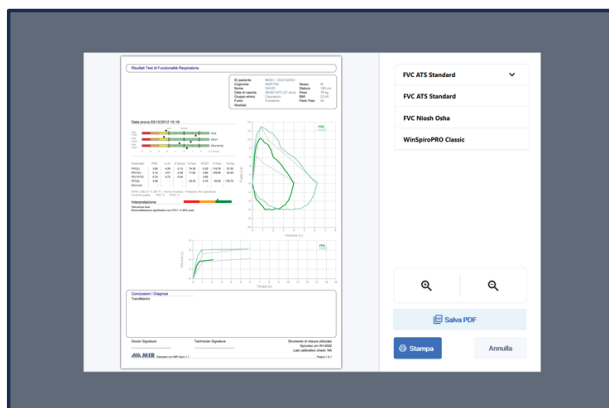

*Valable uniquement pour les dispositifs professionnels MIR

- Incitatif pédiatrique** : Animation en temps réel pour améliorer la collaboration du patient pendant le test. Basé sur un algorithme qui tient compte à la fois du Débit et du Volume pour le rendre plus fiable et plus efficace.

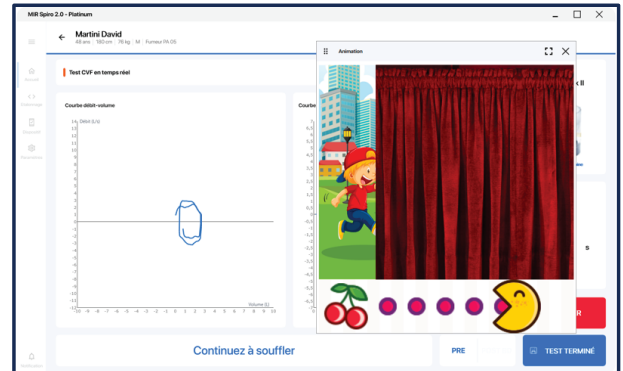

Autres caractéristiques

- Fonctions puissantes de partage de données** : Capacité d'importation/exportation dans différents formats :

Exportation	Fichier au format ATS (Rapport électronique de spirométrie) .mirX (fichier contenant l'archive du dispositif) ; Format propriétaire MIR Spiro ; .csv (Excel) ; .pdf ; .hl7 ; .gdt ; dicom	Importation	WinspiroPRO Bases de données ; Format propriétaire MIR Spiro ; .xml (base de données NDD) mir . (fichier contenant l'archive du dispositif) .hl7
--------------------	---	--------------------	--

\\ **Connectivité**

MIR Spiro fonctionne avec tous les dispositifs professionnels MIR via une connexion USB et Bluetooth Low Energy (BLE \geq 4.0).

\\ **Équations de référence**

L'utilisateur peut sélectionner les auteurs primaires et secondaires (utilisés pour les équations manquantes dans le réglage primaire) dans une liste de 18 (GLI, NHANES, ERS, KNUDSON et autres).

\\ **Pictogrammes zScore LLN**

Conformément aux plus récentes directives ATS, MIR Spiro affiche LLN, zScore et les pictogrammes qui indiquent le score PRE POST pour CVF, VEMS et VEMS/CVF.

\\ **Récupération des données effacées**

Possibilité de récupérer l'intégralité d'une session de spirométrie ou d'oxymétrie précédemment effacée

\\ **Service cloud pour les mises à jour de logiciel et micrologiciel**

\\ **Journal des opérations critiques et des erreurs**

Système avancé de traçage des opérations critiques et des erreurs

Platinum Card

Pour souscrire à un abonnement Platinum, il est nécessaire de **détenir la MIR Spiro Platinum Card**.



Fonctions

Tests supportés	<ul style="list-style-type: none"> • Spirométrie • Oxymétrie
Tests de spirométrie supportés	<ul style="list-style-type: none"> • CVF (Capacité vitale forcée) PRE et POST bronchodilatateur • CVL (Capacité vitale lente) PRE et POST bronchodilatateur • VVM (Ventilation maximale volontaire) PRE et POST bronchodilatateur
Tests d'oxymétrie supportés	Oxymétrie Spot Test de marche de six minutes Oxymétrie du sommeil Holter pour oxymétrie (24 heures)
Langues supportées	Chinois (Chine), Chinois (Taïwan), Tchèque (République Tchèque), Néerlandais (Pays-Bas), Anglais (Royaume-Uni), Anglais (États-Unis), Français (France), Français (Belgique), Géorgien (Géorgie), Allemand (Allemagne), Hongrois (Hongrie), Italien (Italie), Japonais (Japon), Letton (Lettonie), Polonais (Pologne), Portugais (Portugal), Roumain (Roumanie), Russe (Russie), Espagnol (Espagne), Suédois (Suède), Turc (Turquie), Ukrainien (Ukraine)
Paramètres CVF	CVF, VEMS, DEP, DEM75, DEM2575, TEF, VEMS/CVF, VEM6, VEMS/VEM6, DEM25, DEM50, CVIF, VEMS/CV, ELA, VVM (cal), Temps pour DEP, VEM05, VEM05/CVF, VEM075, VEM075/CVF, DEM7585, Extr. Vol, VEM3, VIM1, ratio VIM1/CIV, PIF, VEM3/CVF, PIF, VEM2, VEM2/CVF, FIF25, FIF50, FIF75, R50, VEMS/DEP (EI), VEMS/VEM05 (VEFI), FR, tI, tE, VT/tI, tI/Ttotal, te/tI, VTTI
Paramètres CVL	CV, CEV, CVI, CI, CV, VRE, VRI, VT, EV
Paramètres VVM	VM, VVM

Paramètres d'oxymétrie	
Test Spot	SpO2 [Basal, Min, Max, Moyenne], Fréquence du pouls [Basal, Min, Max, Moyenne], T40, T120, T90, T89, T88, T87, Indice [12s], Événements SpO2, Événements Fréquence du pouls [Bradycardie, Tachycardie], Temps total, Temps mesuré
Test de marche	O2-Gap, Distance estimée, Distance parcourue, Distance prévue [Min, Standard], TΔ2% [SpO2≥2%], TΔ4% [ΔSpO2≥4%], Temps [Repos, Marche, Récupération], Zone de désaturation / Distance Saisie des données facultatives : Dyspnée de Borg [Baseline, End, Change], Fatigue de Borg [Baseline, End, Change], Pression artérielle [Systolique Diastolique], Oxygène administré, SpO2/BPM (Moy. Min. Max. In. Fin.), T90, T89, T88, T87, SpO2/BPM Événements.
Test du sommeil	Événements SpO2, Événements de fréquence du pouls [Bradycardie, Tachycardie] Indice de désaturation (ODI), Désaturation [Valeur moyenne, Durée moyenne, Durée maximale, Pic Nadir], ΔSpO2 [Chute minimale, Chute maximale], Variations totales du pouls, Indice de fréquence du pouls, Temps NOD (4%, 89%, 90%), SpO2/BPM (Moy. Min. Max. In. Fin.)
Équations pour le calcul des valeurs théoriques	Barcelona Zapletal ; CESC 1971 ; Chili 2014 ; Crapo-Bass Knudson ; ERS ECCS Knudson ; ERS ECCS Zapletal ; Forche 2001 Knudson ; GLI ; Hedenström Solymar ; Hong Kong ; Thoracic Society ; Japan Respiratory Society ; Knudson ; Nhanes ; Pereira ; Perez Padilla ; Pneumobill Knudson ; Corée du Sud (Dél-koreai) ; Thaïlande (Thaïföld)



Dispositifs supportés

- Spirolab (écran tactile)
- Minispir (câble USB intégré)
- Minispir Light POST DB
- Spirodoc
- Spirobank II Smart
- Spirobank II Advanced
- Spirobank II BASIC

Prérequis système

Windows

- Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 11 (32 bit/64 bit)
- Intel Celeron N4100, Intel Core i3 3e gén. ou supérieur
- Processeur de 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide (au moins 2 cœurs)
- Résolution minimale de l'écran : 1240x768
- 4 Go de RAM (pour les systèmes 32 bits) / 8 Go de RAM (pour les systèmes 64 bits)
- Port USB
- Compatible Bluetooth Low Energy (Smart Bluetooth)
- Privilèges administrateur requis pour l'installation et le fonctionnement

MacOS

- macOS 11 Big Sur ou version ultérieure (Intel ou Apple Silicon)
- Intel Core i3 (8e génération ou plus) ou puce Apple M1
- Processeur de 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide (au moins 2 cœurs)
- Résolution minimale de l'écran : 1800x1169
- 8 Go de RAM recommandés
- 4 Go d'espace libre sur le disque dur
- Port USB
- Compatible Bluetooth Low Energy (Smart Bluetooth)
- Privilèges administrateur requis pour l'installation et le fonctionnement

*Spirolab, Minispir, Minispir Light, Spirodoc, Spirobank II avec Bluetooth Smart, Spirobank II Advanced et Spirobank II BASIC se connectent au logiciel **MIR Spiro** à l'aide d'un câble USB. Spirobank II Smart se connecte au logiciel **MIR Spiro** aussi bien à l'aide d'un câble USB que via Bluetooth Low Energy.

ITALIE

**MIR Medical
International Research
S.p.A.**

Viale Luigi Schiavonetti,
270 00173, Rome

Tél. +39 06 22 754 777

Fax +39 06 22 754 785

mir@spirometry.com

spirometry.com

USA

MIR USA, Inc.

5462 S. Westridge Drive
New Berlin, WI 53151

Tél. +1 (262) 565-6797

Fax +1 (262) 364-2030

mirusa@spirometry.com

FRANCE

MIR Filiale locale

Jardin des Entreprises, 290,
Chemin de Saint-Dionisy
30980 LANGLADE

Tél. +33 (0)4 66 37 20 68

Fax +33 (0)4 84 25 14 32

mirfrance@spirometry.com

BRÉSIL

MIR Filiale locale

Rua Pinheiro Machado, 2659,
Sl.303, Caxias do Sul RS

Tél. +55 5430253070

mirbrazil@spirometry.com

[in](#) [f](#) [@](#) [▶](#)